

Unsteril • Wiederverwendbar

Gebrauchsanweisung

Modell: siehe Etikett.

Kompatibilität: siehe Etikett.

Spezifikationen

Temperaturgrenze: Betrieb: +5°C bis +40°C; Lagerung/Transport: -20°C bis +55°C

Luftfeuchtigkeitsbegrenzung (Betrieb/Lagerung/Transport): 0~%95 nicht kondensierend

Atmosphärische Druckbegrenzung (Betrieb/Lagerung/Transport): 86kPa~106kPa



Achtung! Nach Bundesrecht (USA) darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf ärztliche Anordnung verkauft werden.

Gebrauchsanweisung

Das Kabel verbindet die am Patienten angebrachte Temperatursonde mit dem Gerät (Patientenmonitor). Es ist ein wichtiger Bestandteil des am Patienten angelegten Stromkreises.

Installation

Gehen Sie wie folgt vor, um das Anschlusskabel korrekt zu installieren;
(Siehe auch die Gebrauchsanweisung für das betreffende elektronische Medizinprodukt)

! WARNUNG

- Dieses Produkt ist ein Zubehör für Temperaturfühler.
- Alle an den Patienten angeschlossenen drahtgebundenen Sensoren, einschließlich der Temperaturfühler, unterliegen Messfehlern, lokaler Erwärmung und möglicher Beschädigung aufgrund von Interferenzen durch hochfrequente Energiequellen. Elektrochirurgische Geräte (ESU) stellen eine solche Quelle dar. Der kapazitiv gekoppelte Strom kann einen Erdungskreis durch das Sondenkabel und die zugehörigen Instrumente bilden, was zu Verbrennungen des Patienten führen kann.
- Verwenden Sie diese Temperatursonden NICHT bei Patienten, die sich einer Magnetresonanztomographie (MRT) unterziehen.
- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie eine Temperatursonde an einem Patienten anlegen, einführen oder entfernen.
- Das Anschlusskabel kann gereinigt und desinfiziert werden (siehe folgendes Verfahren), aber es kann nicht sterilisiert oder autoklaviert werden. Denn Autoklavieren beschädigt das Kabel.
- Weichen Sie die beiden Enden des Verbindungskabels nicht ein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt oder veraltet ist. Bitte entsorgen Sie beschädigte oder veraltete Kabel rechtzeitig.
- Der Stecker an einem Ende des Verbindungskabels darf nur in den entsprechenden Anschluss des Monitors gesteckt werden. Stecken Sie den Stecker niemals in eine Stromquelle, sonst wird das Kabel beschädigt.
- Sterilisieren Sie nicht durch Bestrahlung oder Dampf.

Pflege und Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie das Anschlusskabel mit warmer Seifenlauge.

Desinfektion des Kabels (entnommen aus der Studie des ANIOS-Labors - Referenz Nr.6416.94 / -387)

1.Reinigen Sie das Kabel in einer milden Spülmittellösung, einer Salzlösung (1%) oder einer der folgenden Lösungen:

- Wofasept -- Cidex (rein) -- Sporicidin (1 : 16)
- Cetylcid (1 : 63) -- Mucasol (3%) -- Buraton (rein)
- Alkohol (70%) -- Alconox (1 : 84) -- Sagrotan

(Vermeiden Sie es, das Kabel in eine der Reinigungslösungen zu tauchen.)

2.Spülen Sie das Kabel in Wasser ab. Wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Entsorgung

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gemäß den örtlich geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Sollten Sie Fragen zu diesen Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertreter.

Hinweis: * Alle eingetragenen Warenzeichen und Marken, die in diesen Informationen erwähnt werden, sind immer Eigentum des ursprünglichen Besitzers.

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4. und 5. Stock, Gebäude zwei, Industriegebiet Hualian, Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District, 518109 Shenzhen, VOLKSREPUBLIK CHINA
E-Mail: sales@med-linket.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Deutschland
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726
UK Verantwortliche Person: Lotus Global Co Ltd
Adresse: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG,
England, Vereinigtes Königreich Tel: 0044-20-70961611

Die folgenden Symbole können auf dem Produkt oder der Produktkennzeichnung erscheinen:

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Seriennummer | Lagerung Begrenzung der Luftfeuchtigkeit | Begrenzung der Lagertemperatur | Atmosphärische Druckbegrenzung | Enthält kein Naturkautschuklatex | Unsteril | Siehe Anleitung instrukcja | Datum des Herstellungsdatum | Modellnummer | Medizinisches Gerät | Eindeutige Geräteerkennung |